

# SEQUOIA ViralShield

SVSG.20 1.0.

Nano respirátor s efektivní filtrací proti COVID-19.




Certifikováno na ochranu proti COVID-19 dle EU normy RFU 02.075 verze 2.

Specifická plocha nano membrány je 15.000krát větší než u netkaných textilií nebo melt blown. Ochrana proti patogenům včetně virů a plísní.



SEQUOIA ViralShield respirátor je ultralehký a příjemný na nošení. Vyroben z nanovláken o vysoké hustotě. Jedinečná kombinace inovativních filtračních materiálů poskytuje nejvyšší standardy ochrany a zaručuje pro uživatele zvýšený komfort dýchání.

## **NANO** Pro

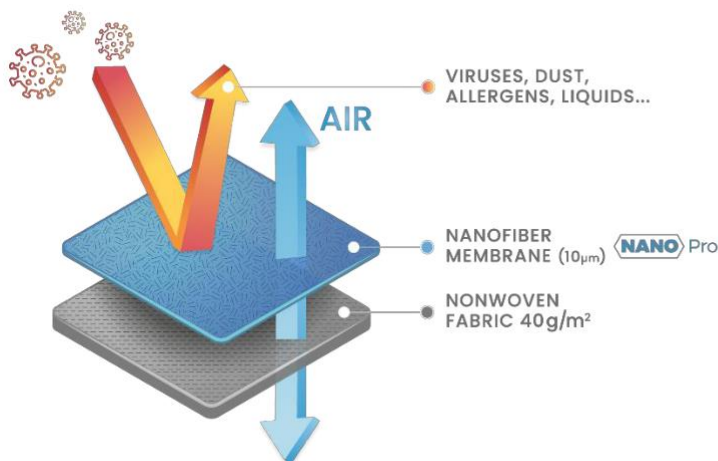


### Filtrační materiál:

- ultralehké (0.5 gr/m<sup>2</sup>) a ultratenké (0.4µm) nanovláknó
- 3 vrstvá struktura
- pórovitost 95%
- průměr pórů 0.02 µm
- 20 miliard pórů 1cm<sup>3</sup>
- propustnost vzduchu: delta P 40Pa
- hydro- a oleo-fobní materiál pracující jako mechanická bariéra k zastavení virů a bakterií
- vysoká úroveň bakteriální filtrace\*

## Hustá struktura pro důkladnější filtraci škodlivých částic

NanoPro membrány jsou složeny z nanovláken, které jsou přibližně 1000krát tenčí než lidský vlas. Nanovláknata tvoří strukturu s vysokou hustotou, která je odolná vůči poškození a schopná zastavit i ty nejmenší pevné a vzdušné částice.

NanoPro respirátor dle testů dosahuje lepších výsledků v délce užívání s porovnáním s FFP2 a FFP3 (nesnížení účinků filtrace v průběhu času).

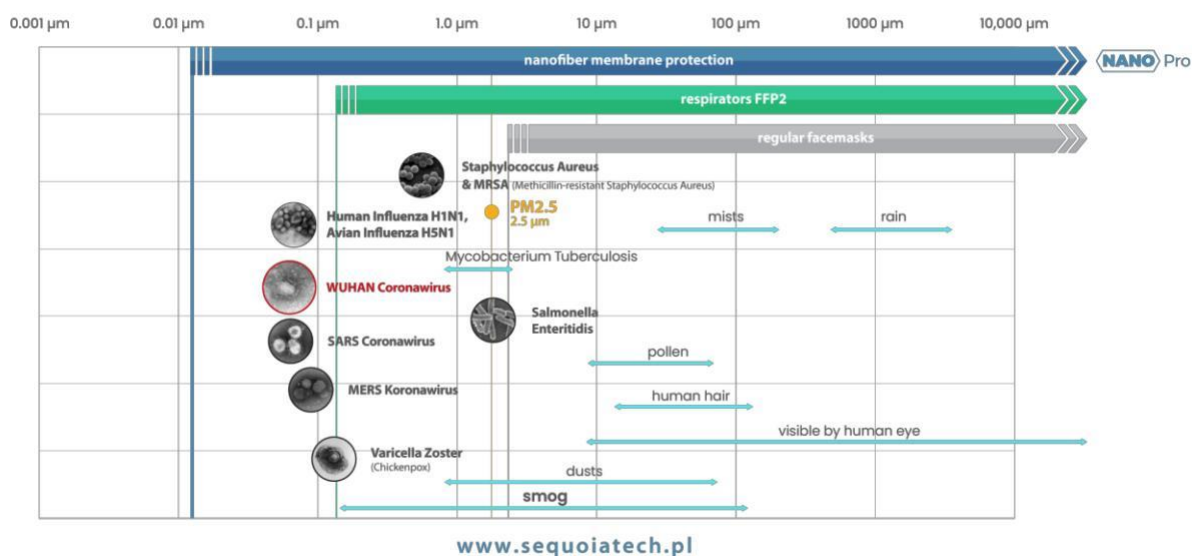

### INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ:

- Před použitím si důkladně umyjte ruce. Respirátor vyjměte z obalu, uchyťte za pásky, přiložte na obličej nosní sponou nahoru, připevněte za uši.
- Prsty upravte nosní sponu dle tvaru nosu.
- Před použitím zkontrolujte vzduchotěsnost.
- Správné nasazení respirátoru je rozhodující pro jeho efektivitu.
- Dejte si ruce před masku a zhluboka vydechněte. Pokud cítíte únik vzduchu upravte nosní sponu nebo zvyšte těsnost gumových pásků vedoucích kolem uší a tento postup opakujte dokud nebudete spokojeni.

### UPOZORNĚNÍ:

- Tento produkt není odolný proti ohni a nesmí se používat v oblastech s otevřeným ohněm.
- Nano respirátor nesmí být používán déle než 30hodin.
- Nepoužívejte znovu/opakovaně.
- Nepoužívejte v oblastech s nízkým obsahem kyslíku.
- Dýchací zařízení nedodává kyslík.
- Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí možnost výbuchu.
- Nepoužívejte v prašném prostředí.
- Nepůjčujte váš respirátor jiným osobám

### Distributor pro ČR a SK

Rocket start s.r.o., Sokolská tř.1615/50, 702 00 Ostrava, Česká republika, DIČ: CZ05539455

[www.SmartCoat.cz](http://www.SmartCoat.cz), [info@smartcoat.cz](mailto:info@smartcoat.cz), tel.kontakt: +420 705 123 450

- Vlasy nebo vousy mohou snížit přilnavost respirátoru a tím snížit jeho ochranné vlastnosti.
- Nepoužívejte jako ochranu před plyny, dýmy a těkavými látkami.
- Děti mohou respirátor používat pouze pod dohledem rodičů/zákonných zástupců.
- Nedoporučuje se pro děti do 2,5let.
- Přestaňte okamžitě respirátor nosit pokud se v něm necítíte dobře. Je-li respirátor poškozen, zlikvidujte jej.

**SKLADOVÁNÍ:**

Respirátor by měl být skladován v původním obalu na suchém místě, chráněném proti atmosférickým podmínkám, které zajišťuje optimální teplotu a vlhkost. Nesmí být vystaven přímému působení UV záření. Skladujte v suchu mimo sluneční světlo při teplotě v rozmezí -15°C a + 40°C.

**BALENÍ:**

1 KUS / V TRANSPARENTNÍ PLASTOVÉ POŠETCE  
50 KUSŮ / V KARTÓNU, VŽDY HYGIENICKÉ BALENÍ PO 1KS

**VELIKOST:** UNIVERZÁLNÍ **BARVA:** SVĚTLE ŠEDÁ

\* Testy hotového produktu, prováděné v souladu s normou EN14683:2009 + AC prokázaly více než 99% účinnost bakteriální filtrace.